

FÖRBRUKNINGSMATERIEL SJUKVÅRD

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Detta materielvårdsschema gäller för materiel som är kopplad till schemat på mvif.se.

Allmänt

Schemat gäller för förbrukningsmateriel som definieras som medicinteknisk produkt (MTP) och har krav på mikrobiell renhet.

MTP med krav på mikrobiell renhet delas in i huvudgrupperna sterila, höggradigt rena och rena MTP.

Steril MTP

Sterilitet krävs för produkter som penetrerar hud eller slemhinna eller som genomströmmas av vätskor till områden som normalt är sterila, samt för implanterat.

På förpackningen finns bl.a. innehåll, tillverkningsår, steriliseringsmetod och utgångsdatum angivet. Se avsnitt Märkning på förpackningar, sidan 3.

Sterila produkter bör lagras i särskilt rum som inte används som genomgångsrum eller i särskilt skåp på hylla/korgställning.

Höggradigt ren MTP

Produkter som är höggradigt rena kan användas om de kommer i beröring med slemhinnor utan att penetrera dessa, eller skadad hud.

Ren MTP

Produkter i denna grupp berör vid normal användning endast intakt hud och inte slemhinnor. De ska vara rena för ögat.

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Steril MTP	0	Åtejp	9	9	8	Fdm	Fd
Höggradigt ren MTP	0	Åtejp	9	Tluft	12	Fdm	Fd
Ren MTP	0	Åtejp	9	Tluft	12	Fdm	Fd

Särskilda riktlinjer

Förpackning

Allmänt

Det är viktigt att en MTP behåller sin specificerade mikrobiella renhetsgrad ända fram till dess att produkten används. Dessa produkter ska i regel vara förpackade enskilt i produktförpackning, i avdelningsförpackning eller samförpackning eller förvaras på annat sätt som bibehåller dess specificerade renhetsgrad fram till dess att de används.

Förpackningstyper

Transportförpackning

Är ett samlande och skyddande emballage under transport av avdelningsförpackning med samma produktinnehåll.

Samförpackning

Är transportförpackning till ny transportförpackning med färre avdelningsförpackningar eller i kombination med andra avdelningsförpackningar.

Avdelningsförpackning












Är en samlande och skyddande förpackning för enskilda medicintekniska produktförpackningar med samma innehåll och samma renhet.

Produktförpackning

Är en skyddande förpackning för den enskilda produkten. Produktförpackningen öppnas i direkt anslutning till att produkten ska användas. Bruten förpackning för steril produkt ska ej kunna återförslutas.

Märkning på förpackningar

För MTP där spårbarheten är ett specificerat krav har varje produktförpackning/avdelningsförpackning en tydlig märkning.

Märkning	Beskrivning
	"Medicintekniskprodukt för engångsbruk eller användning på en patient vid ett tillfälle eller en åtgärd"
	"Används före" - utgångsdatum. Datum anges i år, månad och eventuellt dag
	"Satsnummer"
	"Tillverkningsdatum". Datum anges i år och månad
	"Steril"
	"Sterilisering med ånga eller torr värme"
	"Sterilisering med etylenoxid"
	"Sterilisering med strålning"
	"Får ej återsteriliseras"
	"OBS! Se bruksanvisningen"
	"Se bruksanvisning innan användning"

Märkning	Beskrivning
	"Används inte om förpackningen är skadad"
	"Förvaras torrt"

Förvaringsmetod

Steril MTP förvaras i ren-förråd.

Referenser

För respektive produkt gällande bipacksedel, text på förpackning eller motsvarande.

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
2	M7782-117005	GENOMFÖR STATKTRL

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad.
- Byt ut skadad materiel.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Steril materiel: Vart 8:e år

- Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.
- Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovvis enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3. Den häftande materielen är lagringskänslig.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad.
- Byt ut skadad materiel.

Ren/höggradigt ren materiel: Vart 12:e år

- Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.
- Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovvis enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3. Den häftande materielen är lagringskänslig.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad.
- Byt ut skadad materiel.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning och nationell insats

- Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.
- Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovvis enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3. Den häftande materielen är lagringskänslig.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad.
- Kontrollera utgångsdatum. Utgångsdatumet ska vara minst 6 månader framåt i tiden.
- Kassera utgången materiel.

Åtgärder vid utlämning till internationell insats

- Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.
- Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovvis enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3. Den häftande materielen är lagringskänslig.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad.
- Kontrollera utgångsdatum. Utgångsdatumet ska vara minst 12 månader framåt i tiden.
- Kassera utgången materiel.

Åtgärder vid mobilisering

- Textilier; kontrollera att de är hela, rena och torra.
- Häftande materiel och textilier; Kontrollera stickprovvis enligt M7782-117005 GENOMFÖR STATKTRL, kontrollnivå 3. Den häftande materielen är lagringskänslig.
- Kontrollera att förpackningen är oskadad.
- Kassera utgången materiel.