

SÄNGAR FÖR SJUKVÅRD

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Sängar enligt objektförteckning	Aktas	0	0	Kallfd	8	Fdm	Fd

Avgränsningar

Publikationen gäller nedanstående sängar för sjukvård.

- Fältsäng sjv
- Järnsäng sjv m/47
- Järnsäng sjv m/KA
- Järnsäng sjv m/39–47
- Järnsäng sjv m/39
- Järnsäng sjv m/ä

För intensivvårdssängar och sjuksäng (SjvS) gäller M7782-145006 SJHSÄNG O FÖRNMTRL.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Kontrollera att sängarna är kompletta.
- Gör ren metalldelarna från rost.
- Bättra vid behov ytbehandlingen.
- Gör ren textildelar med borste eller tvätta dem vid behov.
- Torka textildelarna.
- Förvara sängarna stående på gaveländan i buntar och högst 10 stycken.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 12:e år

- Kontrollera genom stickprov att inte rost- eller mögelskador förekommer.
- Om kontrollen ger anledning till anmärkning, vidta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.