

ÖVRIGA MEDICINSKA INSTRUMENT

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Detta materielvårdsschema gäller för materiel som är kopplad till schemat på mvif.se.

Allmänt

— OBS —

Korttidförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— VARNING —

lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.

Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.

Instruktionerna i detta schema är allmänna och följs när de är applicerbara på den materiel som vårdas.

Schemat är avsett för metallinstrument och liknande för medicinskt bruk.

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

| Publikationen gäller | Hantering och transport | Vårdmar- kering | Förpack- ning | Förvarings- metod | Vård- intervall | Vård- personal | Vård- instans |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Övriga instrument | 9 | 9 | 9 | Tluft | 12 | Fdm | Fd |

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Rena bomullsvantar skall alltid användas vid beröring av instrument.
Handsvett kan orsaka fläckar och rostbildning. Stålull får ej användas vid ren-
göring eller putsning av instrument.

Vårdmarkering

Förpackningarna skall märkas med en etikett som anger instrumentets förråds-
beteckning och -benämning samt med årtalstejp. Etikett och årtalstejp fästs
utanpå varje förpackning.

Förpackning

Felfria, rengjorda instrument som inte har originalförpackning förpackas var för
sig i påsslång av transparent 0,1 mm polyeten, som svetsförslutes.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, instruktionsbok, teknisk
order eller motsvarande publikation.

| Ref | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-----|-------------------|------------------|
| 1 | M7782-112001 | NORMER GEMENSAMT |

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Gör ren instrumentet från fett och smuts genom tvättning i varmt vatten tillsatt med tvållösning.
- Skölj i varmt vatten.
- Blås rent med tryckluft.
- Torka i torkskåp.
- Smörj leder på ledade instrument (t.ex. peanger och saxar) med M0741-892072 INSTRUMENTOLJA.
- Gör funktionskontroll.
- Torka och polera med mjuk trasa.
- Förpacka.
- Märk förpackningen.

Torrluftåtgärder

- Förvara i helavfuktat förråd.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 12:e år

- Kontrollera förpackningen.
- Okulärkontrollera instrumentet utan att bryta förpackningen.
- Om kontrollen ger anledning till anmärkning, vidta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera förpackningen.
- Okulärkontrollera instrumentet utan att bryta förpackningen.
- Om kontrollen ger anledning till anmärkning, vidta åtgärder enligt avsnitt ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING.

Åtgärder vid utlämning till insats

- Okulärkontrollera instrumentet utan att bryta förpackningen.