

DIATERMIAPPARAT

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Diatermiapparat fält	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	4	TB	Cvst

Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Före tillsynen skall behovet av översyn vid huvudverkstad kontrolleras.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslista.
- Rengör apparaten vid behov med tvål och vatten.
- Kontrollera att apparaten är fri från yttre skador och korrosion.
- Kontrollera kablar och anslutningar samt elektrodhandtagen.
- Funktionsprova materielen enligt bruksanvisningen.
- Packa apparaten enligt bruksanvisningen, VPI-behandla. Elektrodena packas var för sig i påsslang, som svetsförsluts. VPI-papper läggs i varje förpackning.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Kontroll vid verkstad enligt kontrollnorm.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid mobilisering

Ingen central riktlinje.