

FÄLTRÖNTGENAPPARATER

ALLMÄNT

För utförligare beskrivning av normerna se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
Fältröntgenapparater	Aktas	Klapp	Orig	Tluft	4	TB	Cvst

Övriga riktlinjer

Röntgenapparat får av säkerhetsskäl inte kopplas till elektrisk kraftkälla eller startas av annan personal än sådan som har erforderlig röntgenteknisk utbildning.

Vid behov av reparation utnyttjas den tillverkare, leverantör eller verkstad som FSC anvisar i särskild ordning.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn och förrådsställning

- Före tillsynen skall behovet av översyn vid huvudverkstad kontrolleras.
- Rengör apparaten och tillbehören från fett, olja och smuts.
- Kontrollera att högspänningsgenerator och röntgenrör inte läcker olja.
- Smörj stativ, kullager, vajrar m m enligt för apparattypen gällande bruksanvisning.
- Kontrollera filmkassetter beträffande defekta låsmekanismer, skevhet eller bucklor.
- Kontrollera att sprickbildning inte finns på blygummiförkläden och blygummihandskar.
- Kontrollera blyglasfönster till genomlysningsskärmen.
- Kontrollera filter och glödlampa till mörkrumsarmaturen.
- Kontrollera lysrör i filmgranskningsapparaten. Kontrollera anslutningsdon och anslutningsledningar.

- Gör funktionskontroll enligt särskilt kontrollschema. Kontrollen skall göras av teknisk personal med särskild utbildning.
- Packa apparaten med tillbehören i originalförpackningen och VPI-behandla.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vart 4:e år

Kontroll vid verkstad enligt kontrollnorm.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid

- Tillför röntgenfilm, framkallningskemikalier och läkemedel enligt särskilda anvisningar.
- I fred får röntgenapparaten inte utlämnas till trupp om inte röntgenutbildad personal står till förfogande.

Åtgärder vid mobilisering

- Tillför röntgenfilm, framkallningskemikalier och läkemedel enligt särskilda anvisningar.