

MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 1

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Allmänt

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— VARNING —

**Iakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

| Publikationen gällar | Hantering och transport | Vårdmärkning | Förpackning | Förvaringsmetod | Vårdintervall | Vårdpersonal | Vårdinstans |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| F3556-000125 VAKUUMMADRASS | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft:9 | 8 | Fdm:9 | Fd |
| F3556-000133 VAKUUMMADRASS G | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft:9 | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M3840-990759 MOBILT STRÅLSKYDD | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |
| M7220-433010 SÄNG IV | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7313-804010 VAKUUMMADRASS 1865 | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft:9 | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7808-132010 STRÄCKSKENA HARE | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7810-083010 SJUKBÅR MEDEVAC4 | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |
| M7810-085010 SJUKBÅR 5 | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7810-116010 KOMBI RYGGBRÄDA | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7810-301010 FIXERINGSVÄST | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7810-309010 FIX O LYFTVÄST 2 | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7861-510010 BÅRBOCK FÄLLB | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |
| M7862-111011 STRÄCKSKENA II /T | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7862-112010 STRÄCKSKENA FÄLLB | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7862-133010 STRÄCKSKENA 3 | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7870-093010 BORD OP LÄTT | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |

| Publikationen gäller | Hantering och transport | Vårdmarkering | Förpackning | Förvaringsmetod | Vårdintervall | Vårdpersonal | Vårdinstans |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| M7864-804010 STRÅLSKYDDSFÖRKL M | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |
| M7864-804110 STRÅLSKYDDSFÖRKL L | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |
| M7864-804210 STRÅLSKYDDSFÖRKL XL | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |
| M7864-805110 STRÅLSKYDDSHANDSK M | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |
| M7880-352010 BEHANDLSTOL KOMPA | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M7880-352210 PROVTAGNINGSSSTOL | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M8200-259010 STRÅLSKYDDSKLÄDER/S | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |
| M8281-371010 VAKUUMSPLINTAR /S | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft:9 | 8 | Fdm:9 | Fd |
| M8281-806010 STRÅLSKYDD RTG 4/S | Aktas:9 | Klapp | 9 | Tluft | 4 | Fdm:9 | Fd |

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning.
Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

Förvaringsmetod

Madrasser förvaras utrullade.
Splintar förvaras utan skarpa veck.

Vårdpersonal

Endast personal med för materielen särskild utbildning.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

| Ref | Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|------------|--------------------------|---|
| 1 | M7780-006661 | HANDH MCS SE, |
| 2 | M7782-112001 | NORMER GEMENSAMT |
| 3 | TO AF UHMAT 650 015711 | KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER |
| 4 | M7775-002120 | PIS MOBILT STRÅLSKYDD |

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Packa materielen
- Vårdmarkera

Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Packa materielen
- Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
- Vårdmarkera
- Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv