

MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 2

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Allmänt

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M2310-505010 DESTAPPARAT EL	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M6709-710010 ULTRALJUDSTVÄTT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7280-115010 DISKBÄNK	Aktas	Klapp	Emb	Tluft	4	T	Vst
M7445-301010 LAF-BÄNK	Aktas	Klapp	0	Tluft	4	T:9	Vst
M7445-302010 LAF-BÄNK PCR	Aktas	Klapp	0	Tluft	4	T:9	Vst
M7550-154010 HANDTVÄTTST FÄLT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7550-154110 HANDTVÄTTST FÄLT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7830-111010 DISKDESINFEKTOR M	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7830-113010 SPOLDESINFEKTOR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7830-276010 AUTOKLAV MELAG	Aktas:9	Kbok	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7830-278110 AUTOKLAV	Aktas:9	Kbok	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7830-279010 AUTOKLAV, SPECIAL	Aktas:9	Kbok	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7830-291010 AUTOKLAV 1	Aktas:9	Kbok	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7830-813011 STERILBORD /T	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7852-010010 HANDSKBOX M UNDTR	Aktas	Klapp	0	Tluft	4	T:9	Lev

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7880-602010 RENG O DESINFENHET	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7880-603110 SMÖRJ F HAND/K	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7886-536110 TANDSTAN- APPARAT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning. Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

Autoklaver skall förrådshållas med stängd men ej reglad lucka.

Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

Vårdpersonal

Fdm:9; Endast personal med för materielen särskild utbildning.

T:9; Endast auktoriserad tekniker får utföra servicen.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7780-006661	HANDH MCS SE
2	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER
4	M7775-001900	PIS AUTOKLAV
5	M7775-002300	PIS AUTOKLAV /T
6	M7775-001220	PIS AUTOKLAV, SPEC
7	M7775-002180	PIS BÄRBAR SUG /T
8	M7775-001780	PIS DESTAPPARAT EL
9	M7775-001240	PIS STERILISERUTR ¹
10	M7786-032091	ANVMAN HANDTVÄTTST FÄLT T
11	M7786-265261	IBOK STERILBORD

- 1 Innehåller packinstruktion för Diskdesinfektor och Autoklav monterade i Sterilutr /K.

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Genomför daglig och särskild tillsyn enligt MVSCHDS. Genomför grundtillsyn enligt MVSCHG.²
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.³
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Förvaras med stängt frontfönster, så långt som möjligt.²
- Förvaras stängd med genomföringskammare öppen.⁴
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

2 Gäller M7445-301010 LAF-BÄNK, M7445-302010 LAF-BÄNK PCR och M7852-010010 HANDSKBOX M UNDTR.

3 Gäller ej M7445-301010 LAF-BÄNK, M7445-302010 LAF-BÄNK PCR och M7852-010010 HANDSKBOX M UNDTR.

4 Gäller M7852-010010 HANDSKBOX M UNDTR.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.⁵
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.⁶
- Förvaras med stängt frontfönster, så långt som möjligt.⁵
- Förvaras stängd med genomföringskammare öppen.⁷
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

5 Gäller M7445-301010 LAF-BÄNK, M7445-302010 LAF-BÄNK PCR och M7852-010010 HANDSKBOX M UNDTR.

6 Gäller ej M7445-301010 LAF-BÄNK, M7445-302010 LAF-BÄNK PCR och M7852-010010 HANDSKBOX M UNDTR.

7 Gäller M7852-010010 HANDSKBOX M UNDTR.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.⁸
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Töm apparaten på vätska⁹
- Torrtorka
- Packa materielen
- Vårdmarkera

8 M7445-301010 LAF-BÄNK, M7445-302010 LAF-BÄNK PCR och M7852-010010 HANDSKBOX M UNDTR.

9 Tillägg för destillationsapparat: Kontrollera att kondensorn är tömd.

Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.¹⁰
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Töm apparaten på vätska¹¹
- Torrtorka
- Packa materielen
- Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
- Vårdmarkera
- Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv

10 M7445-301010 LAF-BÄNK, M7445-302010 LAF-BÄNK PCR och M7852-010010 HANDSKBOX M UNDTR.

11 Tillägg för destillationsapparat: Kontrollera att kondensorn är tömd.