

MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 4

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Allmänt

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M2303-137010 REDUCERVENTIL TYPG	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	5	Fdm:9	Fd
M2303-197110 REDUCERVENTIL 6	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	5	Fdm:9	Fd
M2303-606110 REDUCERVENTIL TG	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	5	Fdm:9	Fd
M2758-827010 UNDERSÖKNINGS- LAMPA	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M2758-844010 UNDERSÖKNLAMPA 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M2758-828010 BELYSNING KOMPAKT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3001-802130 FÖRSTGLAS M LAMPA	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3533-754010 MANOMETER ENDOTRAK	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3835-404010 KAMERA HANDSTYCKE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M6576-155010 PLASTSVETSAPP STEP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M6576-159010 IMPULSSVETS	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7880-110010 KIRURGIENHET /K	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7813-142020 VÄRMESKÅP LÄKEM	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7833-125010 CENTRIFUG 12ML	Aktas	Klapp	0	Tluft	4	T:9	Vst
M7833-126010 CENTRF PCR 1,5ML	Aktas	Klapp	0	Tluft	4	T:9	Vst
M7833-133010 CENTRIFUG	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-231010 SUGPUMP 1	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-306010 VENTILATOR TRANSPAC	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	2	Fdm:9	Fd
M7835-317011 INHALATOR /K	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-802010 LUNGFUNKT- PROVARE	Aktas:9	Åtejp	9	Tluft	4	Fdm	Fd
M7835-990618 DEMANDVENTIL LSP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7839-118010 BLODÅTERV- MASKIN	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	TB	Cvst
M7839-118110 BLODÅTERV- MASKIN	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	TB	Cvst
M7884-201010 ELKIRURGI- UTRUSTN /K	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	2	TB	Cvst
M7880-261010 KAPSELBLANDARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7884-211010 KIRGENH DENTAL	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	2	TB	Cvst

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning.
Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

Vårdpersonal

Fdm:9; Endast personal med för materielen särskild utbildning.

T:9; Endast auktoriserad tekniker får utföra servicen.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7780-006661	HANDH MCS SE
2	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER
4	M7775-001840	PIS REDUCERVENTIL TYP G
5	M7775-001100	PIS UNDERSÖKNLAMPA
6	M7775-001140	PIS MANOMETER ENDOTRAK
7	M7775-001180	PIS PLASTSVAPP STEP
8	M7775-001580	PIS BLODÅTERVMASKIN
9	M7775-002080	PIS KIRGENH DENTAL

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.¹
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.²
- Genomför sterilisering³
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Förvaras med locket på glänt¹
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

- 1 Gäller M7833-126010 CENTRF PCR 1,5ML och M7833-125010 CENTRIFUG 12ML
- 2 Gäller ej M7833-126010 CENTRF PCR 1,5ML och M7833-125010 CENTRIFUG 12ML
- 3 Gäller M7880-110010 KIRURGIENHET /K enligt MVSCHD, åtgärd Förvaring

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.⁴
- Förvaras med locket på glänt⁴
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.⁵
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

- 4 Gäller M7833-126010 CENTRF PCR 1,5ML och M7833-125010 CENTRIFUG 12ML
- 5 Gäller ej M7833-126010 CENTRF PCR 1,5ML och M7833-125010 CENTRIFUG 12ML

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan⁶
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen

VARNING

Vid materiel som alstrar värme, tillse att materielen har svalnat innan den packas. Risk för brand eller brännskada.

- Packa materielen
 - Vårdmarkera
- 6 För flyggodkänd materiel, kontrollera även märknings befintlighet och läsbarhet.

Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan⁷
- Genomför grundtillsyn enligt MVSCHG.⁸
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen

VARNING

Vid materiel som alstrar värme, tillse att materielen har svalnat innan den packas. Risk för brand eller brännskada.

- Packa materielen
 - Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
 - Vårdmarkera
 - Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv
- 7 För flyggodkänd materiel, kontrollera även märknings befintlighet och läsbarhet.
- 8 Gäller M7833-126010 CENTRF PCR 1,5ML och M7833-125010 CENTRIFUG 12ML