

## MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 8

### MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

#### Allmänt

— **OBS** —

**Korttidsförvaring**

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— **VARNING** —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.  
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

## Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se  
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar-kering	För-pack-ning	Förvarings-metod	Vård-intervall	Vård-personal	Vård-instans
M3521-812010 ELEKTRONISK VÅG	Aktas	Klapp	Emb	Tluft:9	4	Fdm:9	Fd
M3451-025010 ANEMOMETER 1	Aktas	Klapp	Emb	Tluft:9	4	T	Vst
M3545-531010 FUKTIGHETSMÄTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M3545-537010 FUKTIGHETSMÄT 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M3560-315010 GASFLÖDESTEST 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3560-405010 GASFLÖDESTESTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M3604-406010 TEMPMÄTARE DIG	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3604-453010 FEBERTERMOMETER	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M3604-407110 TEMPMÄT EXTERNA GIV	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3604-407210 TEMPMÄT EXTERNA GIV	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3606-102010 TERMOMETER IR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3620-351010 KONDUKTIVITETMÄTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3665-120010 MAGNETFÄLTSMÄTARE 1	Aktas	Klapp	0	Tluft:9	4	T	Vst
M3676-117010 LJUDNIVÅMETER 1	Aktas:9	Klapp	9	Tluft:9	4	Fdm:9	Fd
M3676-117020 LJUDNIVÅMETER 1B	Aktas:9	Klapp	9	Tluft:9	4	Fdm:9	Fd
M3681-117112 VOC DETINS PID 10/T	Aktas	Klapp	0	Tluft:9	4	T	Vst
M3681-120010 PARTIKELRÄKNARE 1	Aktas	Klapp	0	Tluft:9	4	T:9	Vst

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar-kering	För-pack-ning	Förvarings-metod	Vård-intervall	Vård-personal	Vård-instans
M3681-313010 OXYGENMÄTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft:9	4	Fdm:9	Fd
M3681-330010 RADONGASMÄTARE 1	Aktas	Klapp	0	Tluft:9	4	T	Vst
M3683-105010 KLORMÄTARE DIGITAL	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M3688-013010 SPEKTROFOTOMETER 1 M3690-013011 SPEKTROMETER 1 /T	Aktas	Klapp	Emb	Tluft:9	4	T:9	Lev
M3743-589110 TEMPERATURLOGGER	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7837-430010 DIATERMIAPP 3	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	T:9	Cvst
M7837-431010 DIATERMIAPPARAT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	T:9	Cvst
M7837-432010 DIATERMIAPP 4	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	T:9	Cvst
M7837-433010 DIATERMIAPPARAT 5	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	1	T:9	Cvst
M7838-404010 BLODTRYCKSSIMULATOR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-523010 KARDIOSKOP PROPAQ	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-524110 KARDIOSKOP 204	Aktas:9	Klapp	9	Tluft:9	4	Fdm:9	Fd
M7838-525010 KARDIOSKOP 206	Aktas:9	Klapp	9	Tluft:9	4	Fdm:9	Fd
M7838-536010 DEFIBRILLTESTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-554010 ÖVERVAKNINGSMONITOR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft:9	4	Fdm:9	Fd
M7838-509010 AUDIOMETER 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-563010 PULSOXIMETERSIM	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-564010 EKG-MODUL	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar-kering	För-packning	Förvaringsmetod	Vård-intervall	Vård-personal	Vård-instans
M7839-125010 INFUSTIONUTRTESTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7839-802010 ALKOHOLTESTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7839-802110 ALKOHOLTESTARE FST	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7839-802210 ALKOHOLTESTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7869-813010 ELSÄKANALYSATOR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7869-814010 MULTIPARAMETERSIM	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7869-817010 MULTIPARAMSIM 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd

## Särskilda riktlinjer

### Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning.  
Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

Urtaga batterier hanteras enligt MVIF - Elektroteknisk materiel

M7782-124003 ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA

M7782-124011 BLYBATTERIER GEMENSAMT

M7782-124013 BLYBATTERIER FYLLDA

M7782-124021 TORRBATTERIER GEMENSAMT

M7782-124022 BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER

M7782-124023 LITIUMBATTERIER

### Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

### Förvaringsmetod

Förvaras i rumstemperatur.

### Vårdpersonal

Endast personal med för materielen särskild utbildning.

## Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

<b>Ref</b>	<b>Förrådsbeteckning</b>	<b>Förrådsbenämning</b>
1	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
2	M7780-006661	HANDH MCS SE,
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER
4	M7782-124003	ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA
5	M7782-124011	BLYBATTERIER GEMENSAMT
6	M7782-124013	BLYBATTERIER FYLLDA
7	M7782-124021	TORRBATTERIER GEMENSAMT
8	M7782-124022	BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER
9	M7782-124023	LITIUMBATTERIER

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Demontera batterier
- Demontera skrivarpapper<sup>1</sup>
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.<sup>2</sup>

1 Gäller för M7838-523010 KARDIOSKOP PROPAQ, M7838-524110 KARDIOSKOP 204, M7838-525010 KARDIOSKOP 206 och M7838-554010 ÖVERVAKNINGSMONITOR.

2 Gäller ej M3681-120010 PARTIKELRÄKNARE 1.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera batterier, om nödvändigt ladda
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.<sup>3</sup>
- Demontera batterier
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.<sup>3</sup>

3 Gäller ej M3681-120010 PARTIKELRÄKNARE 1.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Komplettera med ny sensor och genomför daglig och särskild tillsyn enligt MVSCHDS<sup>4</sup>
- Montera nya batterier och nytt skrivarpapper<sup>5</sup>
- Montera batterier, om nödvändigt ladda
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Kontrollera kalibreringsstatus, om nödvändig kalibrera
- Packa materielen
- Vårdmarkera

4 Gäller för M3681-313010 OXYGENMÄTARE.

5 Gäller för M7838-523010 KARDIOSKOP PROPAQ, M7838-524110 KARDIOSKOP 204, M7838-525010 KARDIOSKOP 206 och M7838-554010 ÖVERVAKNINGSMONITOR.

### Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera nya batterier, om nödvändigt ladda
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs samt gör inställningar för patientläge<sup>6</sup>
- Montera nytt skrivarpapper<sup>7</sup>
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Kalibrera materielen
- Packa materielen
- Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
- Vårdmarkera
- Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv

6 Gäller för M7838-524110 KARDIOSKOP 204, M7838-525010 KARDIOSKOP 206 och M7838-554010 ÖVERVAKNINGSMONITOR.

7 Gäller för M7838-523010 KARDIOSKOP PROPAQ, M7838-524110 KARDIOSKOP 204, M7838-525010 KARDIOSKOP 206 och M7838-554010 ÖVERVAKNINGSMONITOR.