

MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 10

MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

Allmänt

— **OBS** —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— **VARNING** —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2740-264010 PANNLAMPA 6 LED	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M2753-732011 ARBETSBELYSNING /T	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M3005-117010 MIKROSKOP	Aktas	Klapp	Emb	Tluft	4	T	Vst
M3005-306010 STEREOMIKROSKOP 1	Aktas	Klapp	Emb	Tluft:9	4	T:9	Vst
M3835-232010 KAMERA F MIKROSKOP	Aktas	Klapp	Emb	Tluft	4	T	Vst
M7813-132010 BLODTRANSPORTLÅDA	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7813-132020 BLODTRANSPÅLÅDA	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7829-708110 VÄRMEVÄSKA INFUSION	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-236010 SUGPUMP EL 4	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-236110 SUGPUMP EL	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-236210 SUGPUMP EL 7	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-238010 OPSUG	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7835-246010 SUGPUMP PORTABEL	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-250010 OPERATIONSSUG 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7835-251010 SUGPUMP EL 8	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-252010 SUGPUMP EL 9	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7835-322010 THORAXDRÄNAGESUG	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmar- kering	Förpack- ning	Förvarings- metod	Vård- intervall	Vård- personal	Vård- instans
M7835-325010 THORAXDRÄNSUG 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7835-326010 VENTILATOR 12	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-805010 SPIROMETER	Aktas:9	Klapp	9	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd
M7838-109010 OFTALMOSKOP MINI	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-110010 OTOSKOP MINI	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-114010 OTOSKOP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-114110 OFTALMOSKOP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-120010 OTO-OFTALMOSKOP /K	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-207010 FICKDOPPLER VASK	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-319010 FOTOMETER HB	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-551010 PULSOXIMETER	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-552010 PULSOXIMETER ONYX	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-568010 CO-OXIMETER	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-817010 PULSOXIMETER 4	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7849-126010 PROKTOSKOP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7849-307010 LARYNGOSKOP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft:9	8	Fdm:9	Fd
M7849-601010 TOURNIQUET	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7858-197010 SPRUTPUMP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7858-186010 SPRUTPUMP 1 HBO	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7858-210010 INFPUMP MINDRE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7858-516010 SPRUTPUMP 3	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	2	Fdm:9	Fd
M7858-518010 SPRUTPUMP 4	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7860-108010 PANNLAMPA OP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7869-670010 BLOD/ VÄTSKEVÄRMARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7869-675010 PATIENTVÄRMARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7869-677010 BLODVÄTSKE MINDRE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7869-678010 BLOD/VÄTSKEV 3	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning. Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

Urtagna batterier hanteras enligt MVIF - Elektroteknisk materiel:

M7782-124003 ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA

M7782-124011 BLYBATTERIER GEMENSAMT

M7782-124013 BLYBATTERIER FYLLDA

M7782-124021 TORRBATTERIER GEMENSAMT

M7782-124022 BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER

M7782-124023 LITIUMBATTERIER

Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

Förvaringsmetod

Förvaras frysfrött.

Vårdpersonal

Fdm:9; Endast personal med för materielen särskild utbildning.

T:9; Endast auktoriserad tekniker får utföra servicen.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
2	M7780-006661	HANDH MCS SE,
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER
4	M7782-124003	ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA
5	M7782-124021	TORRBATTERIER GEMENSAMT
6	M7782-124022	BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER
7	M7782-124023	LITIUMBATTERIER
8	M7775-001120	PIS MIKROSKOP
9	M7775-001280	PIS SUGPUMP EL
10	M7775-001300	PIS OPERATIONSSUG
11	M7775-001800	PIS OFTALMOSKOP MIN
12	M7775-001820	PIS OTOSKOP MINI
13	M7775-001340	PIS OTO-OFTALMOSKOP
14	M7775-001360	PIS FICKDOPPLER VAS
15	M7775-001440	PIS FOTOMETER HGB
16	M7775-001620	PIS TOURNIQUET
17	M7775-001680	PIS BLOD/VÄTSKEVÄRM
18	M7775-001660	PIS PATIENTVÄRMARE

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Demontera batterier¹
- Packa materielen.
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

1 Gäller för M7858-516010 SPRUTPUMP 3; Batteri demonteras ej, förvaras med en laddning på 30-50 %.

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera batterier, om nödvändigt ladda
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Demontera batterier²
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

2 Gäller för M7858-516010 SPRUTPUMP 3; Batteri demonteras ej, förvaras med en laddning på 30-50 %.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera batterier, om nödvändigt ladda
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Packa materielen
- Vårdmarkera

Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera nya batterier, om nödvändigt ladda³
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Packa materielen
- Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
- Vårdmarkera
- Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv

3 Gäller för M7858-516010 SPRUTPUMP 3; Batteri byts vid behov efter funktionskontroll.