

# MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 11

## MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

### Allmänt

#### — OBS —

##### **Korttidsförvaring**

**Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.**

#### — VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.  
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

## Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se  
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmärkning	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7835-314010 VENTILATOR 9	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7835-315010 VENTILATOR 10	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-264010 BLODANALYSINSTR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-264110 BLODANALYSINSTR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-265010 KEMIINSTR STORT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-318110 BLODGLUKOS- MÄTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-321010 BLODGLUKOS- MÄTARE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-327010 LEUKOCYTMÄTARE 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-330010 BLÅSVOLYM- SCANNER	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-365110 KEMIINSTR LITET	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-401110 BLODTRYCKSMÄT AUT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	8	Fdm:9	Fd
M7838-533010 DEFIBR HEART FR2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-535010 DEFIBRILL MINDRE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-537010 KAPNOMETER	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-537110 KAPNOGRAF 1	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M7838-538010 DEFIBRILL MDRE AUT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-541010 DEFIBRILLATOR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	2	Fdm:9	Fd
M7838-554110 ÖVERVAKMON MINDRE	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-559010 EKG APPARAT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-561010 EKG APPARAT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-562010 ARB EKG APPARAT	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-567010 ÖVERVAKNINGSM 567	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-570010 DEFIBRILLATOR 3	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-805010 ULTRALJUDSUTR	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-806010 ULTRALJUDSUTR 2	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7838-820010 ULTRALJUDSUTR 4	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd
M7858-198010 VOLYMPUMP	Aktas:9	Klapp	9	Tluft	4	Fdm:9	Fd

## Särskilda riktlinjer

### Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning. Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

Urtaga batterier hanteras enligt MVIF - Elektroteknisk materiel

M7782-124003 ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA

M7782-124011 BLYBATTERIER GEMENSAMT

M7782-124013 BLYBATTERIER FYLLDA

M7782-124021 TORRBATTERIER GEMENSAMT

M7782-124022 BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER

M7782-124023 LITIUMBATTERIER

### Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

### Vårdpersonal

Endast personal med för materielen särskild utbildning.

### Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
1	M7782-112001	NORMER GEMENSAMT
2	M7780-006661	HANDH MCS SE,
3	TO AF UHMAT 650 015711	KORROSIONSSKYDD VID INTERNATIONELLA INSATSER
4	M7782-124003	ALKALISKA BATTERIER, SLUTNA
5	M7782-124011	BLYBATTERIER GEMENSAMT
6	M7782-124013	BLYBATTERIER FYLLDA
5	M7782-124021	TORRBATTERIER GEMENSAMT
6	M7782-124022	BRUNSTENS- OCH ALKALINEBATTERIER
7	M7782-124023	LITIUMBATTERIER
8	M7775-001380	PIS BLODANALYSINSTR
9	M7775-001420	PIS BLODGLUKOSMÄT
10	M7775-001740	PIS BLODGLUKOSMÄT
11	M7775-001480	PIS DEFIBRILLAT MIN
12	M7775-001560	PIS ULTRALJUDSUTR

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Demontera batterier<sup>1,2</sup>
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

1 Inbyggt batteri och batteriladdare ska ej demonteras för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT.

2 Batteri demonteras ej, kontinuerlig underhållsladdning vid förvaring, gäller för M7835-314010 VENTILATOR 9 och M7835-315010 VENTILATOR 10.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera batterier, om nödvändigt ladda<sup>3</sup>
- Tillse att grundtillsyn enligt MVSCHG genomförs. Om MVSCHG ej finns, genomför särskild tillsyn enligt MVSCHDS.
- Demontera batterier<sup>4,5</sup>
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

3 Batteriladdare/elektroder ska bytas för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT.

4 Inbyggt batteri och batteriladdare ska ej demonteras för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT

5 Batteri demonteras ej, kontinuerlig underhållsladdning vid förvaring, gäller för M7835-314010 VENTILATOR 9 och M7835-315010 VENTILATOR 10.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera batterier, om nödvändigt ladda<sup>6</sup>
- Kontrollera konfiguration och programvaruversion, uppdatera vid behov
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Packa materielen
- Vårdmarkera

6 Batteriladdare/elektroder ska bytas för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT.

### Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Montera nya batterier, om nödvändigt ladda<sup>7</sup>
- Kontrollera konfiguration och programvaruversion, uppdatera vid behov
- Tillse att funktionskontroll genomförs på materielen
- Packa materielen
- Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
- Vårdmarkera
- Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv

7 Batteriladdare/elektroder ska bytas för M7838-542010 DEFIBRILL 2 M AUT.