

## MVSCHF SJUKVÅRDSMATERIEL 14

### MATERIELVÅRDSSHEMA FÖRRÅDSSTÄLLNING

#### Allmänt

— **OBS** —

**Korttidsförvaring**

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDS-FÖRV.

— **VARNING** —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.  
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

## Normtabell

För utförligare beskrivning av normerna se  
M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

| Publikationen gäller                   | Hantering och transport | Vårdmarkering | Förpackning | Förvaringsmetod | Vårdintervall | Vårdpersonal | Vårdinstans |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| M2875-291010<br>FRYS F BLOD/<br>PLASMA | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft:9         | 8             | Fdm          | Fd          |
| M2875-333110<br>LÄKEMKYLSK 70L H       | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft:9         | 8             | Fdm          | Fd          |
| M2875-333210<br>LÄKEMKYLSK 70L V       | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft:9         | 8             | Fdm          | Fd          |
| M2875-351010<br>KYLBOX TP 32L          | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft           | 8             | Fdm          | Fd          |
| M2875-354010<br>KYLBOX TP 22L          | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft           | 8             | Fdm          | Fd          |
| M2875-363010<br>LÄKEMKYLSK<br>320L H   | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft:9         | 8             | Fdm          | Fd          |
| M2875-363110<br>LÄKEMKYLSK<br>320L V   | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft:9         | 8             | Fdm          | Fd          |
| M2875-370010<br>LÄKEMKYLSK 286L<br>H   | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft:9         | 8             | Fdm          | Fd          |
| M2875-370110<br>LÄKEMKYLSK 286L<br>V   | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft:9         | 8             | Fdm          | Fd          |
| M2875-816010<br>BLODBANKSKYL           | Aktas                   | Klapp         | 0           | Tluft:9         | 4             | T            | Vst         |
| M2875-818010<br>LÄKEMKYLSK 210         | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft:9         | 8             | Fdm          | Fd          |
| M7838-352010<br>INKUBATOR 1            | Aktas                   | Klapp         | 0           | Tluft:9         | 4             | T            | Vst         |
| M7838-401030<br>BLODTRYCKSMÄT 3        | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft           | 8             | Fdm          | Fd          |
| M7838-401060<br>BLODTRYCKSMÄT 6        | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft           | 8             | Fdm          | Fd          |
| M7838-406011<br>BLODTRYCKSMÄT<br>9 /T  | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft           | 8             | Fdm          | Fd          |

| Publikationen gäller                 | Hantering och transport | Vårdmarkering | Förpackning | Förvaringsmetod | Vårdintervall | Vårdpersonal | Vårdinstans |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
| M7838-402010<br>BLTRMÄT M UTB<br>MAN | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft           | 8             | Fdm          | Fd          |
| M7869-535310<br>INFSTATIV IDA        | Aktas:9                 | Åtejp         | 9           | Tluft           | 8             | Fdm          | Fd          |

## Särskilda riktlinjer

### Hantering och transport

Materielen skall hanteras och transporteras enligt särskild anvisning. Saknas sådan anvisning, skall M7780-006661 HANDH MCS SE, användas.

### Förpackning

Packa materielen enligt eventuellt förekommande packningsinstruktion.

### Förvaringsmetod

Förvaras frysfrött.

### Vårdpersonal

Endast personal med för materielen särskild utbildning.

## Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, servicemanual, instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, materielvårdsschema eller motsvarande publikation.

| Ref | Förrådsbeteckning      | Förrådsbenämning                                |
|-----|------------------------|---|
| 1   | M7782-112001           | NORMER GEMENSAMT                                |
| 2   | M7780-006661           | HANDH MCS SE,                                   |
| 3   | TO AF UHMAT 650 015711 | KORROSIONSSKYDD VID<br>INTERNATIONELLA INSATSER |

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Batterier demonteras<sup>1</sup>
- Tövattenbehållare töms<sup>2</sup>
- Lock/dörr ställs på glänt<sup>3</sup>
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Förvara stående<sup>3</sup>
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

1 Gäller M2875-816010 BLODBANKSKYL.

2 Gäller kylskåp och inkubatorer.

3 Gäller kylboxar, kylskåp, frysar och inkubatorer.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vårdintervall: Se normtabell

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera materielen avseende skador eller åverkan
- Kontrollera att lock/dörr står på glänt<sup>4</sup>
- Packa materielen
- Vårdmarkera
- Förvara stående<sup>4</sup>
- Ställ emballage för utrustningen i öppet läge för god luftcirkulation.

4 Gäller kylboxar, kylskåp, frysar och inkubatorer.

## ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

### Åtgärder vid utlämning till utbildning

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Genomför funktionskontroll/kalibrering på materielen
- Packa materielen
- Vårdmarkera

### Åtgärder vid utlämning till insats

- Kontrollera materielens befintlighet mot tillbehörslistan
- Kontrollera enheten avseende skador eller åverkan
- Genomför funktionskontroll/kalibrering på materielen
- Packa materielen
- Korrosionsskydda materielen enligt TO AF UHMAT 650 015711
- Vårdmarkera
- Klargör utrustningen för transport till insats enligt särskilda direktiv