

## LÄKEMEDELSKYLSKÅP

### MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

#### Allmänt

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2875-333110	LÄKEMKYLSK 70L H
M2875-333210	LÄKEMKYLSK 70L V
M2875-363010	LÄKEMKYLSK 320L H
M2875-363110	LÄKEMKYLSK 320L V
M2875-818010	LÄKEMKYLSK 210L

#### VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.  
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

## Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-452201	ANVMAN LÄKEMKYLSK	M2875-333110, M2875-333210, M2875-363010, M2875-363110
2	M7786-452821	ANVINSTR LÄKEMKYLSK	M2875-818010
3	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla
4	M7777-715900	TL F M2875-333111-2	M2875-333110
5	M7777-715910	TL F M2875-333211-0	M2875-333210
6	M7777-715410	TL F M2875-363011-7	M2875-363010
7	M7777-715420	TL F M2875-363111-5	M2875-363110
8	M7777-716070	TL F M2875-818011	M2875-818010

## Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	5 till 30 °C.	Alla
Transport- och förvaringstemperatur	Frysfritt	Alla

## Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2 % M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	Alla
3	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla

### Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

## Daglig tillsyn

### Före användning

- Vid upprättande

#### Anm

Kylskåpet ska stå upprätt i rumstemperatur i 2-4 timmar för att oljan ska vara lagom varm vid uppstart.

Har kylskåpet utsatts för låg temperatur under liggande transport ska det stå upprätt minst 6 timmar.

- Se Ref 1 avsnitt "Gör följande efter avemballering" och avsnitt "Innan skåpet används följ nedanstående".
- Se Ref 2 avsnitt "Innan medicinkylskåpet används" sid 6 (sid 6) och avsnitt "Installation av medicinkylskåpet" sid 6 (sid 6).

- Hela enheten
- Driftstemperatur
- Display

Kontroll skador, fastsättning.

Omgivningstemperatur uppnådd.  
Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 2.

Kontroll att röd lampa inte lyser.

- Se Ref 1 avsnitt "Drift och underhåll".
- Se Ref 2 avsnitt "Vid larm" sid 7 (sid 7).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Under användning

- Display
- Tövattenbehållare

Kontroll att röd lampa inte lyser.

- Se Ref 1 avsnitt "Drift och underhåll".
- Se Ref 2 avsnitt "Vid larm" sid 7 (sid 7).

Tömning vid behov.

- Se Ref 1 avsnitt "Drift och underhåll".
- Se Ref 2 avsnitt "Daglig rutin" sid 7 (sid 7).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador, fastsättning.
- Hela enheten Rengöring.
  - Se Ref 1 avsnitt "Drift och underhåll".
  - Se Ref 2 avsnitt "Rengöring och underhåll" sid 12 (sid 12).Använd Vårdmateriel nr 1 med nr 2 eller nr 3.  
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Förvaring

- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 2.
- Tövattenbehållare Tömning
  - Se Ref 1 avsnitt "Drift och underhåll".
  - Se Ref 2 avsnitt "Daglig rutin" sid 7.
- Läkemedelskylskåpets dörr Dörren ska ej vara helt tillsluten.

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt Ref 3 samt nedanstående punkter.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- Tövattenbehållare Tömning
  - Se Ref 1 avsnitt "Drift och underhåll".
  - Se Ref 2 avsnitt "Daglig rutin" sid 7.
- Läkemedelskylskåpets dörr Dörren ska ej vara helt tillsluten.

## RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Vårdintervall och förlängd vårdperiod

Vårdintervall	Förlängd vårdperiod
Var tredje månad eller vid behov	Tillämpas ej.

### Var tredje månad eller vid behov

1. Hela enheten

Rengöring.

- Se Ref 1 avsnitt "Drift och underhåll".
- Se Ref 2 avsnitt "Rengöring och underhåll" sid 12 (sid 12).

Använd Vårdmateriel nr 1 med nr 2 eller nr 3.

Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER