

OPERATIONS- OCH SEKRETSUG 2 /S

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M8282-003110	OP SEKRETSUG 2 /S

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Daglig tillsyn

Före användning

- Transportlåda Kontroll renhet, skador, läsbarhet märkning, fastsättning och funktion.
- Förbrukningsmateriel Kontroll renhet, skador och utgångsdatum. Ersätt utgången förbrukningsmateriel.
- M7835-250010 OPERATIONSSUG 2 Se M7782-700882 MVSCHDS OPSUG.
- M7835-236010 SUGPUMP EL 4 Se M7782-700862 MVSCHDS SUGPUMP EL.
- M7835-325010 THORAXDRÄNSUG 2 Se M7782-701362 MVSCHDS THORAXDRSUG.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- M7835-236010 SUGPUMP EL 4 Se M7782-700862 MVSCHDS SUGPUMP EL.
- M7835-325010 THORAXDRÄNSUG 2 Se M7782-701362 MVSCHDS THORAXDRSUG.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Sats Inventering enligt M7777-716390 SL F M8282-003110.
- Förbrukningsmateriel Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.
- M7835-250010
OPERATIONSSUG 2 Se M7782-700882 MV SCHDS OPSUG.
- M7835-236010 SUGPUMP EL 4 Se M7782-700862 MV SCHDS SUGPUMP EL.
- M7835-325010
THORAXDRÄNSUG 2 Se M7782-701362 MV SCHDS THORAXDRSUG.
- Övrig materiel Kontroll renhet, skador, funktion.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Allmänt Förvaring av packad sats enligt förvaringsmetod angiven på satsens transportlåda.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- M7835-250010
OPERATIONSSUG 2 Se M7782-700882 MV SCHDS OPSUG.
- M7835-236010 SUGPUMP EL 4 Se M7782-700862 MV SCHDS SUGPUMP EL.
- M7835-325010
THORAXDRÄNSUG 2 Se M7782-701362 MV SCHDS THORAXDRSUG.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Anm

Kontrollera att vårdintervallen i detta materielvårdsschema stämmer med aktuell utgåva av angivna materielvårdsscheman.

Varje månad

1. M7835-236010 SUGPUMP EL 4 Se M7782-700862 MVSCHDS SUGPUMP EL.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var sjätte månad

2. M7835-325010 THORAXDRÄNSUG 2 Se M7782-701362 MVSCHDS THORAXDRSUG.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov

3. M7835-250010 OPERATIONSSUG 2 Se M7782-700882 MVSCHDS OPSUG.
4. M7835-236010 SUGPUMP EL 4 Se M7782-700862 MVSCHDS SUGPUMP EL.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER