

ULTRALJUDSUTRUSTNING 4

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7838-820010	ULTRALJUDSUTR 4

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-082001	ANVMAN ULTRALJUD 4	M7838-820010
2	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	M7838-820010
3	M7777-716180	TL F M7838-820011	M7838-820010

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	10 °C till 40 °C	M7838-820010
Transport- och förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C Anm Vid förvaring i mer än 1 månad ska förvaring ske i 15 °C till 25 °C.	M7838-820010
Övrig information	Se Ref 1 avsnitt "Specifikationer" sid 145-146 (sid 155-156).	M7838-820010

Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	M7838-820010
2	-	Luddfri trasa	M7838-820010

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd.
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Batteri Laddning.
Se Ref 1 avsnitt "Ladda batteriet" sid 13-15 (sid 21-23).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Hela enheten Kontroll indikatorer och felmeddelanden.
Se Ref 1 avsnitt "Felsökning" sid 91-96 (sid 101-106).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Kontroll skador och fastsättning.
- Hela enheten Rengöring.
Se Ref 1 avsnitt "Kapitel 10: Rengöring och desinficering" sid 103-118 (sid 113-128).
Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.
- Batteri Laddning.
Se Ref 1 avsnitt "Ladda batteriet" sid 13-15 (sid 21-23).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 2.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- Batteri Demontering.
Se Ref 1 avsnitt "Uttagning av batteriet" sid 15 (sid 23).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER