

## LÄKEMEDELSKYLSKÅP

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M2875-370010	LÄKEMKYLSK 286L H
M2875-370110	LÄKEMKYLSK 286L V

### Allmänt

#### — VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.  
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

### Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-087601	BANV PORKKA LMKYLSK	Alla
2	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla
3	M7777-716410	TL F M2875-370011	M2875-370010
4	M7777-716420	TL F M2875-370111	M2875-370110

### Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	10°C till 32°C	Alla
Transport- och förvaringstemperatur	Frysfri	Alla

## Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	Alla
3	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla
4	-	Dammsugare	Alla
5	M0729-301095	SILIKONPASTA 301	Alla

### Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

## Daglig tillsyn

### Före användning

- Vid upprättande
  - 1 Rengöring.  
Se Ref 1 avsnitt "Introduktion" sid 28 (sid 28).  
Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2.  
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.
  - 2 Vädra.  
Lämna kylskåpsdörrarna öppna en stund.
  - 3 Kontrollera kondens.  
Kondens kan uppstå på insidan av kylskåpet om omgivningstemperaturen skiftar från kall (utomhus) till varm (inomhus). Anslut då inte strömmen innan enheten är torr och har uppnått rumstemperatur.
- Hela enheten  
Kontroll skador och fastsättning.
- Driftstemperatur  
Omgivningstemperatur uppnådd.  
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 1.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Under användning

- Styrenhet  
Kontroll temperatur.  
Se Ref 1 avsnitt "S3.1 Temperaturkontroll (NORMALTILLSTÅND)" sid 33 (sid 33).
- Styrenhet  
Kontrollera larm.  
Se Ref 1 avsnitt "Larm" sid 38 (sid 38).
- Kondensvattenbehållare  
Töm vid behov.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Efter användning

- Hela enheten  
Kontroll skador och fastsättning.
- Hela enheten  
Rengöring.  
Se Ref 1 avsnitt "Rengöring" sid 45 (sid 45).  
Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2.  
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Förvaringstemperatur  
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 1.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring  
Genomför åtgärder enligt Ref 2 samt nedanstående punkter.
- Förvaringstemperatur  
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 1.
- Avfuktning  
Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Vårdintervall och förlängd vårdperiod

Vårdintervall	Förlängd vårdperiod
Var tredje månad eller vid beho	Tillämpas ej.

### Var tredje månad eller vid behov

1. Hela enheten  
Rengöring.  
Se Ref 1 avsnitt "Rengöring" sid 45 (sid 45).  
Använd vårdmateriel nr 1 med nr 2 eller nr 3.  
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.
2. Hela enheten  
Avfrostning.  
Se Ref 1 avsnitt "Meny för avfrostningsinformation" sid 44 (sid 44).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Kalenderstyrda tillsyner - Långa intervall

#### B1 - Varje år

3. Kylvanhet och kondensor  
Rengöring.  
Se Ref 1 sid 46 (sid 46).  
Använd vårdmateriel nr 4.  
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.
4. Dörrpackning  
Kontroll skador och slitage, rengöring och smörjning.  
Se Ref 1 sid 46 (sid 46).  
Använd vårdmateriel nr 1, nr 2 och nr 5.  
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER