

## SUGPUMP EL 8

### MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7835-251010	SUGPUMP EL 8

### Allmänt

#### VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.  
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

### Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-044191	BANV LCSU 4	Alla
2	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla
3	M7777-716430	TL F M7835-251011	M7835-251010 ingående i M7835-251011
4	M7777-716440	TL F M7835-251012	M7835-251010 ingående i M7835-251012

## Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	0°C till 40°C	Alla
Transport- och förvaringstemperatur	-40°C till 70°C	Alla
Övrig information	Se Ref 1 avsnitt "10 Tekniska specifikationer" sid 113 (sid 113).	Alla

## Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

## Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	Alla
3	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla

## Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

## Daglig tillsyn

### Före användning

- Hela enheten Kontroll renhet, skador och fastsättning.
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd.  
Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Vid batteridrift Laddning batteri.  
Se Ref 1 avsnitt "5 Batteriet" sid 107-108 (sid 107-108).
- Hela enheten Apparattest.  
Se Ref 1 avsnitt "Apparattest" sid 109 (sid 109).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Under användning

- Hela enheten Kontroll indikatorlampor.  
Se Ref 1 avsnitt "Kontrollpanel och indikatorlampor" sid 106 (sid 106).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Efter användning

- Hela enheten Låt sugpumpen fortsätta att gå en kort stund när sugningen är klar.  
Se Ref 1 avsnitt "Efter varje användning" sid 107 (sid 107).
- Hela enheten Rengöring.  
Se Ref 1 avsnitt "Rengöring" sid 109 (sid 109).  
Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2 eller nr 3.  
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.
- Vid batteridrift Laddning batteri.  
Se Ref 1 avsnitt "5 Batteriet" sid 107-108 (sid 107-108).
- Hela enheten Apparattest.  
Se Ref 1 avsnitt "Apparattest" sid 109 (sid 109).
- Tillbehör Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 2.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- Batteri Kontinuerlig underhållsladdning.  
Se Ref 1 avsnitt "5 Batteriet" sid 107-108 (sid 107-108).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

## Särskild tillsyn

### Varje år

1. Batteri Test.  
Se Ref 1 avsnitt "Batteritest" sid 107 (sid 107).

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

### Vid behov

2. Batteri Byte.

### RAPPORTERA FEL OCH BRISTER