

SJUKVÅRDSMATERIEL ALLMÄNT

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel som är kopplad till schemat på mvif.se.

Allmänt

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema är allmänna och följs när de är applicerbara på den materiel som vårdas.

Referenser

För respektive materiel gällande användarmanual, instruktionsbok eller motsvarande publikation.

Drift- och förvaringsmiljö

Se för respektive materiel gällande användarmanual, instruktionsbok eller motsvarande publikation där följande information kan förekomma:

- omgivningstemperatur vid drift
- transport- och förvaringstemperatur
- luftfuktighet vid drift
- luftfuktighet vid förvaring
- vibrationer
- damm
- övrig information.

Vårdmateriel

Vid rengöring och desinficering rekommenderas nedanstående vårdmateriel eller motsvarande det som anges i materielens dokumentation.

Nr	Beteckning	Benämning	Användning
1	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Desinficering
2	M0730-120110	FLYT.TVÅL MEVON 66	Rengöring med mild tvållösning. Vattenlösning med 2% M0730-120110.
3	-	Luddfri trasa	Avtorkning

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Okulärbesiktning avseende renhet, skador och fastsättning
- Förbrukningsmateriel och läkemedel Kontroll avseende hållbarhet och utgångsdatum
- Batterier Laddning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Okulärbesiktning avseende renhet, skador och fastsättning
- Hela enheten Rengöring och/eller desinficering. Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 2.
- Förbrukningsmateriel Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel
- Batterier Laddning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Se M7782-112007 KORTTIDS FÖRV
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 2

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vid behov

1. Hela enheten Funktionskontroll
2. Diverse Byte. T.ex. batterier och lampor.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER