

HANDTVÄTTSTÄLL

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNTILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7550-154010	HANDTVÄTTST FÄLT
M7550-154110	HANDTVÄTTST FÄLT

Vårdbestämmelser

Pos	=	Positionsnummer, löpande
GT 1	=	Grundtillsyn (utförs varje år)
GT F	=	Grundtillsyn före förrådsställning (utför GT 1 och GT F)
Se Ref	=	Se anvisningar i referensdokument

Allmänt gäller att kontroll ska ske beträffande skador, fastsättning och funktion.

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Referenser

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7786-032091	ANVMAN HANDTVÄTTSTF (Gäller för M7550-154010)
M7786-033901	IBOK HANDTVÄTTSTÄLL (Gäller för M7550-154110)

Handtvättställ

Pos	GT	GT	System/komponent	Omfattning/felyttring
	1	F		
1	x		Elektriska komponenter	Skador, fastsättning
2	x		VVS-komponenter	Skador, fastsättning
3	x		Handfat och upphängningsplatta	Skador, fastsättning
4	x		Slangar	Skador, fastsättning
5	x		Låda	Skador, fastsättning
6	x		Handtvättställ	Elsäkerhetskontroll
7	x		Manometer	Kalibrering
8	x		Handtvättställ	Funktionskontroll 1 Driftsätt systemet. 2 Kontrollera samtliga komponenter avseende läckage. 3 Kontrollera vattentryck in, 1,5 bar. 4 Kontrollera att varmvattenberedarens kontrollampa lyser under uppvärmning samt att den slocknar då varmvattenberedaren slår ifrån. 5 Kontrollera tappvattentemperatur, 41-44°C.
9		x	Avloppsslang M1741-910010 SLANG M KOPPLING	Byte
10	x		Märkning	Årtalstejp eller motsvarande märkning för utförd GT