

HANDTVÄTTSTÄLL FÄLT

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7550-154010	HANDTVÄTTST FÄLT
M7550-154110	HANDTVÄTTST FÄLT

Allmänt

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-032091	ANVMAN HANDTVÄTTSTF	M7550-154010
2	M7786-033901	IBOK HANDTVÄTTSTÄLL	M7550-154110
3	M7777-713240	TL F M7550-154011-4	M7550-154010
4	M7777-713940	TL F M7550-154111-2	M7550-154110
5	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	Alla
3	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Okulärbesiktning avseende skador och fastsättning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Hela enheten Kontrollera löpande alla komponenter avseende läckage samt att avloppet har avrinning

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Okulärbesiktning avseende skador och fastsättning
- Hela enheten Rengöring.
Se Ref 2 avsnitt "Vård" sid 15 (sid 17).
Använd vårdmateriel nr 1 med nr 2 eller nr 3.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Före förvaring eller transport Åtgärder före förvaring eller transport.
 - Se Ref 1 avsnitt "Efter användning" sid 1-2 (sid 1-2).
 - Se Ref 2 avsnitt "Före transport eller förvaring" sid 15-16 (sid 15-16).
- Korttidsförvaring Se Ref 5.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Varje månad

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1. | Hela enheten | Okulärbesiktning, elektriska komponenter hela |
| 2. | Hela enheten | Okulärbesiktning, VVS-komponenter hela |
| 3. | Hela enheten | Okulärbesiktning: ev. rengöring.
Se Ref 2 avsnitt "Vård" sid 15 (sid 17).
Använd vårdmateriel nr 1 och nr 2.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2. |
| 4. | Handfat och upphängningsplatta | Kontroll fastsättning |
| 5. | Slangar | Fastsättning, ev. läckage |
| 6. | Låda | Kontrollera ingen lös materiel i låda |
| 7. | Hela enheten | Funktionskontroll:
1 Driftsätt systemet.
2 Kontrollera alla slangar och övriga komponenter avseende läckage.
3 Kontrollera tappvattentemperatur, 41-44 °C. |
| 8. | Grundtillsyn | Giltighet (årtalstejp eller motsvarande märkning) |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER