

BLODTRANSPORTLÅDA /T

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7813-132021	BLODTRANSPLÅDA /T

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Okulärbesiktning avseende skador, renhet
- Inventera Enligt tillbehörslista
- Batteristatus Kontrollera status
- Yttre strömförsörjning Funktionalitet
- Ventilation Ej blockerad
- Transporttid Kontrollera transporttid, omprogrammering vid behov
- Driftstemperatur Rätt temperatur i blodtransportlåda

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Temperaturstatus Kontroll
- Strömförsörjning Kontrollera anslutning, laddning batterier
- Ventilation Fri luftcirkulation
- Placering Kontrollera

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Utrustning, tillbehör Okulärbesiktning, skador, inventering, fastsättning, ersätt
- Hela enheten Okulärbesiktning, skador, fastsättning, rengöring

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaringstemperatur Ej lägre än -32°C, ej högre än +80°C
- Blodtransportlåda Förvaras med ej helt tillslutet lock
- Avfuktning Förvara materielen i avfuktat utrymme vid förvaring längre tid än en månad
- Batterier Demontering

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Varje månad

1. Hela enheten Okulärbesiktning avseende skador, fastsättning
2. Hela enheten Rengöring
3. Kablage Kontrollera anslutningar
4. Batteristatus Kontrollera status
5. Funktion textil Kontrollera funktion

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid behov

6. Blodtransportlåda batteri Byte larmbatterier
7. Temperaturlogger batteri Byte av batteri

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER