

ÖVERVAKNINGSMONITORER

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Allmänt

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7838-524110	KARDIOSKOP 204
M7838-525010	KARDIOSKOP 206
M7838-554010	ÖVERVAKNINGSMONITOR
M7838-554110	ÖVERVAKMON MINDRE
M7838-567010	ÖVERVAKNINGSM 567

— VARNING —

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehör-
slista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs
instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av
publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7780-005501	BANV KARDIOSKOP 20X	M7838-524110 och M7838-525010
2	M7786-029951	ANVMAN ÖVERVMONIT	M7838-554010 ingående i M7838-554011
3	M7786-031371	ANVMAN ÖVERVMONIT	M7838-554010 ingående i M7838-554012
4	M7786-038581	ANVMAN ÖVAKMON MIN	M7838-554110 ingående i M7838-554111
5	M7786-059501	BANV INTELLIVUE X2	M7838-554110 ingående i M7838-554112
6	M7786-059401	SERVICEG INTELLIVUE	M7838-554110 ingående i M7838-554112
7	M7786-038671	ANVMAN BATTERILADD	M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T som används till M7838- 554110
8	M7786-039471	ANVMAN ÖVAKNMON 567	M7838-567010
9	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla
10	M7777-710660	TL F M7838-524111-4	M7838-524110
11	M7777-710610	TL F M7838-525011-5	M7838-525010
12	M7777-711530	TL F M7838-554011-9	M7838-554010 ingående i M7838-554011
13	M7777-712950	TL F M7838-554012-7	M7838-554010 ingående i M7838-554012
14	M7777-714900	TL F M7838-554111-7	M7838-554110 ingående i M7838-554111
15	M7777-716210	TL F M7838-554112	M7838-554110 ingående i M7838-554112

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	0 - 40 °C (monitor) 5 - 40 °C (skrivare)	M7838-524110, M7838-525010, M7838-554010
	Anm Vid CO ₂ - övervakning, se Ref 1/Ref 2/Ref 3 för driftstemperatur.	
	0 - 40 °C	M7838-554110, M7838-567010
	0 - 35 °C vid batteriladdning.	
	0 - 35 °C	M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T som används till M7838- 554110
Transport- och förvaringstemperatur	-20 - 60 °C	M7838-524110, M7838-525010, M7838-554010, M7838-554110, M7838-567010
	0 - 60 °C	M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T som används till M7838- 554110

Miljö	Värde	Gäller för
Övrig information	<ul style="list-style-type: none"> För övrig information, se Ref 1 avsnitt "Monitors miljöspecifikationer" sid 88 (sid 88) och avsnitt "Skrivarspecifikation er" sid 90 (sid 90). 	M7838-524110 och M7838-525010
	<ul style="list-style-type: none"> För övrig information, se Ref 2 avsnitt "Mainstream-CO₂-sensorns miljöspecifikationer" sid 95 (sid 101). 	M7838-554010 ingående i M7838-554011
	<ul style="list-style-type: none"> För övrig information, se Ref 3 avsnitt "Mainstream-CO₂-sensorns miljöspecifikationer" sid 94 (sid 94). 	M7838-554010 ingående i M7838-554012
	<ul style="list-style-type: none"> För övrig information, se Ref 4 avsnitt "Miljöspecifikationer" sid 270-271 (sid 270-271). 	M7838-554110 ingående i M7838-554111
	<ul style="list-style-type: none"> För övrig information, se Ref 5 avsnitt "Miljöspecifikationer" sid 304-305 (sid 304-305). 	M7838-554110 ingående i M7838-554112
	<ul style="list-style-type: none"> För övrig information, se Ref 8 avsnitt "Miljöspecifikationer" sid 285-286 (sid 285-286). 	M7838-567010

Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2 % M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66	Alla
3	-	Luddfri trasa	Alla

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Vid upprättande (SB)
 - Se Ref 1 avsnitt "Installation" sid 13-16 (sid 13-16).
 - Se Ref 2 avsnitt "Inställning" sid 15-20 (sid 21-26).
 - Se Ref 3 avsnitt "Inställning" sid 15-20 (sid 15-20).
 - Se Ref 4 avsnitt "Installation" sid 11-19 (sid 11-19).
 - Se Ref 6 avsnitt "Installation instructions" sid 201-230 (sid 201-230).
 - Se Ref 7 avsnitt "Säkerhetsanvisningar" sid 19 (sid 19).
 - Se Ref 8 avsnitt "Installation" sid 11-18 (sid 11-18).
- Hela enheten
 - Kontroll skador och fastsättning.
 - Se Ref 1 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 69 (sid 69).
 - Se Ref 2 avsnitt "Inspektera och rengöra monitor och tillbehör" sid 78 (sid 84).
 - Se Ref 3 avsnitt "Inspektera och rengöra monitor och tillbehör" sid 78 (sid 78).
 - Se Ref 4 avsnitt "Inspektion av utrustningen och dess tillbehör" sid 243 (sid 243) och avsnitt "Inspektion av kablar och sladdar" sid 244 (sid 244).
 - Se Ref 5 avsnitt "Inspektion av utrustningen och dess tillbehör" sid 273 (sid 273) och avsnitt "Inspektion av kablar och sladdar" sid 273 (sid 273).
 - Se Ref 8 avsnitt "Inspektion av utrustningen och dess tillbehör" sid 257 (sid 257) och avsnitt "Inspektion av kablar och sladdar" sid 257-258 (sid 257-258).

- Batteri

Laddning

- Se Ref 1 avsnitt "Ansluta växelströmsadaptern för att ladda batteriet" sid 65-66 (sid 65-66).
- Se Ref 2 avsnitt "Anslut växelströmsadaptern för att ladda batteriet" sid 73-74 (sid 79-80).
- Se Ref 3 avsnitt "Anslut växelströmsadaptern för att ladda batteriet" sid 73-74 (sid 73-74).
- Se Ref 4 avsnitt "Ladda ett batteri" sid 241 (sid 241).

Vid användning av M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T, se Ref 7 avsnitt "Ladda batteriet" sid 20 (20).

- Se Ref 5 avsnitt "Ladda ett batteri" sid 271 (sid 271).

Vid användning av M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T, se Ref 7 avsnitt "Ladda batteriet" sid 20 (20).

- Se Ref 8 avsnitt "Ladda ett batteri" sid 255 (sid 255).

- Batteri

Konditionering vid behov.

- Se Ref 4 avsnitt "Konditionera ett batteri" sid 241 (sid 241).

Vid användning av M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T, se Ref 7 avsnitt "Ladda batteriet" sid 20 (20).

- Se Ref 5 avsnitt "Konditionera ett batteri" sid 271 (sid 271).

Vid användning av M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T, se Ref 7 avsnitt "Ladda batteriet" sid 20 (20).

- Skrivare

Vid behov. Byt papper.

- Se Ref 1 avsnitt "Installera skrivarpapper" sid 68-69 (sid 68-69).
- Se Ref 2 avsnitt "Installera skrivarpapper" sid 77 (sid 83).
- Se Ref 3 avsnitt "Installera skrivarpapper" sid 77 (sid 77).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Batteri
 - Kontrollera laddning.
 - Se Ref 1 avsnitt “Ansluta växelströmsadaptorn för att ladda batteriet” sid 65-66 (sid 65-66).
 - Se Ref 2 avsnitt “Anslut växelströmsadaptorn för att ladda batteriet” sid 73-74 (sid 79-80).
 - Se Ref 3 avsnitt “Anslut växelströmsadaptorn för att ladda batteriet” sid 73-74 (sid 73-74).
 - Se Ref 4 avsnitt “Indikatorer för batteridrift” sid 236-238 (sid 236-238).
Vid användning av M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T, se Ref 7 avsnitt “Batteriplatsernas statusindikatorer” sid 20 (sid 20).
 - Se Ref 5 avsnitt “Indikatorer för batteridrift” sid 266-268 (sid 266-268).
Vid användning av M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T, se Ref 7 avsnitt “Batteriplatsernas statusindikatorer” sid 20 (sid 20).
 - Se Ref 8 avsnitt “Indikatorer för batteridrift” sid 250-252 (sid 250-252).
 - Vid behov. Byt papper.
 - Se Ref 1 avsnitt “Installera skrivarpapper” sid 68-69 (sid 68-69).
 - Se Ref 2 avsnitt “Installera skrivarpapper” sid 77 (sid 83).
 - Se Ref 3 avsnitt “Installera skrivarpapper” sid 77 (sid 77).
- Skrivare
- Larm och varningar
 - Kontroll.
 - Se Ref 1 avsnitt “Larm och varningar” sid 59-72 (sid 59-72).
 - Se Ref 2 avsnitt “Larm och varningar” sid 49-63 (sid 55-69).
 - Se Ref 3 avsnitt “Larm och varningar” sid 49-63 (sid 53-67).
 - Se Ref 4 avsnitt “4 Larm” sid 55-68 (sid 55-68) och avsnitt “5 Patientlarm och INOP” sid 69-90 (sid 69-90).
 - Se Ref 5 avsnitt “3 Larm” sid 51-64 (sid 51-64) och avsnitt “4 Patientlarm och INOP” sid 65-90 (sid 65-90).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Använda delar

Rengöring.

- Se Ref 1 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 69 (sid 69).
- Se Ref 2 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 78 (sid 84).
- Se Ref 3 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 78 (sid 78).
- Se Ref 4 avsnitt "Skötsel och rengöring" sid 231-233 (sid 231-233).
- Se Ref 5 avsnitt "Skötsel och rengöring" sid 261-263 (sid 261-263).
- Se Ref 7 avsnitt "Säkerhetsanvisningar" sid 19 (19).
- Se Ref 8 avsnitt "Skötsel och rengöring" sid 245-247 (sid 245-247).

Använd Vårdmateriel nr 1, nr 2 och nr 3.
Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 5.

- Batteri

Laddning.

- Se Ref 1 avsnitt "Ansluta växelströmsadaptern för att ladda batteriet" sid 65-66 (sid 65-66).
- Se Ref 2 avsnitt "Anslut växelströmsadaptern för att ladda batteriet" sid 73-74 (sid 79-80).
- Se Ref 3 avsnitt "Anslut växelströmsadaptern för att ladda batteriet" sid 73-74 (sid 73-74).
- Se Ref 4 avsnitt "Ladda ett batteri" sid 241 (241).
Vid användning av M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T, se Ref 7 avsnitt "Ladda batteriet" sid 20 (sid 20).
- Se Ref 5 avsnitt "Ladda ett batteri" sid 271 (sid 271).
Vid användning av M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T, se Ref 7 avsnitt "Ladda batteriet" sid 20 (sid 20).
- Se Ref 8 avsnitt "Ladda ett batteri" sid 255 (sid 255).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 9.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt "Drift- och förvaringsmiljö", sid 3.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.
- Skrivare Vid förvaring längre tid än två månader ska skrivarpapper demonteras.
- Batteri Underhållsladdning kontinuerligt eller var tredje månad.
 - Se Ref 1 avsnitt "Ansluta växelströmsadaptern för att ladda batteriet" sid 65-66 (sid 65-66).
 - Se Ref 2 avsnitt "Anslut växelströmsadaptern för att ladda batteriet" sid 73-74 (sid 79-80).
 - Se Ref 3 avsnitt "Anslut växelströmsadaptern för att ladda batteriet" sid 73-74 (sid 73-74).
 - Se Ref 4 avsnitt "Ladda ett batteri" sid 241 (241).
Se Ref 5 avsnitt "Ladda ett batteri" sid 271 (sid 271).
Vid användning av M2511-989311 BATTLADD ÖVAKMON /T, se Ref 7 avsnitt "Ladda batteriet" sid 20 (sid 20).
 - Se Ref 8 avsnitt "Ladda ett batteri" sid 255 (sid 255).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Varje månad

1 Hela enheten

Rengöring.

- Se Ref 1 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 69 (sid 69).
- Se Ref 2 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 78 (sid 84).
- Se Ref 3 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 78 (sid 78).
- Se Ref 4 avsnitt "Skötsel och rengöring" sid 231-233 (sid 231-233).
- Se Ref 5 avsnitt "Skötsel och rengöring" sid 261-263 (sid 261-263).
- Se Ref 7 avsnitt "Underhåll" sid 19 (19).
- Se Ref 8 avsnitt "Skötsel och rengöring" sid 245-247 (sid 245-247).

Använd Vårdmateriel nr 1, nr 2 och nr 3.

Se detta schema avsnitt "Vårdmateriel", sid 5.

2. Strömadapter och kabel

Kontroll skador och fastsättning.

- Se Ref 1 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 69 (sid 69).
- Se Ref 2 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 78 (sid 84).
- Se Ref 3 avsnitt "Inspektera och rengöra monitorn med tillbehör" sid 78 (sid 78).
- Se Ref 4 avsnitt "Inspektion av kablar och sladdar" sid 244 (sid 244).
- Se Ref 5 avsnitt "Inspektion av kablar och sladdar" sid 273 (sid 273).
- Se Ref 8 avsnitt "Inspektion av kablar och sladdar" sid 257-258 (sid 257-258).

3. Hela enheten (SB)

Uppstart, skrivarkontroll.

- Se Ref 1 avsnitt "Installation" sid 13-16 (sid 13-16) och avsnitt "Installera skrivarpapper" sid 68-69 (sid 68-69).
- Se Ref 2 avsnitt "Inställning" sid 15-20 (sid 21-26) och avsnitt "Installera skrivarpapper" sid 77 (sid 83).
- Se Ref 3 avsnitt "Inställning" sid 15-20 (sid 15-20) och avsnitt "Installera skrivarpapper" sid 77 (sid 77).
- Se Ref 4 avsnitt "Installation" sid 11-19 (sid 11-19).
- Se Ref 6 avsnitt "Installation instructions" sid 201-230 (sid 201-230).
- Se Ref 8 avsnitt "Installation" sid 11-18 (sid 11-18).

4. Blodtrycksmanschett (SB)

Kontroll med blodtrycksmanschett:

- 1 Anslut slang och montera blodtrycksmanschett på arm.
- 2 Starta enheten och vänta tills pumpen stannat.
- 3 Lyssna så inget luftläckage hörs.

5. Pulsoximeter (SB)

Kontroll med pulsoximeter:

- 1 Koppla in sladd och anslut på finger.
- 2 Starta enheten och kontrollera värdena.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER