

AUTOKLAV SPECIAL

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7830-279010	AUTOKLAV, SPECIAL

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt tillbehörslista.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-031401	ANVMAN AUTOKLAV	M7830-279010
2	M7786-031421	ANVMAN AUTOKLAV	M7830-279010

Daglig tillsyn

Före användning

- Autoklav Om autoklaven har varit avstängd mer än en dag, kör ett snabbprogram eller motsvarande med tom kammare.
- Vattentank Fyll försiktigt
- Avloppstank Töm

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning efter var 5:e cykel eller vid behov

- Vattentank Fyll försiktigt
- Avloppstank Töm

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning efter 10 cykler

- Kammaren Rengöring, rengöringstablett.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Vattentank Fyll försiktigt
- Avloppstank Töm

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Körning Kör ett snabbprogram eller motsvarande med tom kammare regelbundet, dock minst två gånger per månad.
- Frysritt Materielen ska förvaras i utrymme utan frysrisk.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än 1 månad ska materielen förvaras i avfuktat utrymme.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Varje vecka under användning eller efter 50 cykler, det som inträffar först

- | | | |
|----|----------------|---------------------|
| 1. | Avloppstank | Rengör |
| 2. | Avloppsfilter | Rengör |
| 3. | Oljetillförsel | Kontrollera |
| 4. | Vattenpump | Kontrollera |
| 5. | Adaptrar | Rengör, kontrollera |
| 6. | Kammare | Rengör |
| 7. | Exteriör | Rengör |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Varje månad eller efter 200 cykler, det som inträffar först

- | | | |
|-----|---------------|----------|
| 8. | Säkerhetsring | Kontroll |
| 9. | Vattentank | Töm |
| 10. | Avloppsfilter | Byt |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 3:e månad eller efter 600 cykler, det som inträffar först

- | | | |
|-----|------------|-------------|
| 11. | Vattentank | Rengöring |
| 12. | Adaptrar | Byte O-ring |

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER