

OPERATIONSSUG

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7835-238010	OPSUG
M7835-250010	OPERATIONSSUG 2

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-030151	ANVMAN OPSUG	M7835-238010 ingående i M7835-238011
2	M7786-031771	ANVMAN OPSUG	M7835-238010 ingående i M7835-238012
3	M7780-009511	BANV OPSUG 2	M7835-250010
4	M7777-712090	TL F M7835-238011-9	M7835-238010 ingående i M7835-238011
5	M7777-712860	TL F M7835-238012-7	M7835-238010 ingående i M7835-238012
6	M7777-716130	TL F M7835-250011	M7835-250010
7	M7782-112007	KORTTIDS FÖRV	Alla

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	10 °C till 40 °C	M7835-238010
	5 °C till 40 °C	M7835-250010
Transport- och förvaringstemperatur	-20 °C till 50 °C	Alla
Övrig information	<ul style="list-style-type: none">• Se Ref 1 avsnitt "Teknisk specifikation".• Se Ref 2, sista sidan.• Se Ref 3 avsnitt "20 Tekniska specifikationer" sid 227 (sid 230).	

Vårdpersonal

Personalkategori Särskild Behörighet (SB) anges för vissa åtgärder i schemat. Särskild behörighet tilldelas personal som genomfört specifik kurs och/eller har blivit förordnad av verksamhetschefen.

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla
2	Tvållösning	Vattenlösning med 2% M0730-120110 FLYT.TVÅL MEVON 66 eller motsvarande	Alla
3	M0842-220319	YTDESINFEKTION PLUS	Alla

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten Kontroll renhet, skador och fastsättning
- Driftstemperatur Omgivningstemperatur uppnådd. Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 2.
- Operationssug Vakuumtest.
 - Se Ref 1 avsnitt "3".
 - Se Ref 2 avsnitt "3".
 - Se Ref 3 avsnitt "7.2 Kontroll av maximalt vakuum för funktionskontroll" sid 208 (sid 211).
- Bakteriefilter Test.
Se Ref 3 avsnitt "13 Filtertest" sid 216 (sid 219).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Kontroll renhet, skador och fastsättning
- Hela enheten Rengöring och desinfektering.
Använd vårdmateriel nr 1 med nr 2 eller nr 3. Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.
 - Se även Ref 1 avsnitt "4".
 - Se även Ref 2 avsnitt "4".
 - Se även Ref 3 avsnitt "14 Riktlinjer för rengöring" sid 217-218 (sid 220-221).
- Tillbehör Sterilisering.
Se Ref 3 avsnitt "15. Sterilisering" sid 218 (sid 221).
- Tillbehör Ersätt förbrukad förbrukningsmateriel.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Korttidsförvaring Se Ref 7.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 2.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad, förvara materielen i avfuktat förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vid behov

1. Säkring

Byte

- Se Ref 1 “Säkring” i avsnitt “Felsökning”.
- Se Ref 2 “Säkring” i avsnitt “Felsökning”.
- Se Ref 3 avsnitt “12 Byte av defekt säkring” sid 215 (sid 218).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER