

AUTOKLAV

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M7830-276010	AUTOKLAV

Allmänt

VARNING

**lakttag försiktighet vid hantering av sjukvårdsmateriel.
Om materielen ej är rengjord kan det finnas risk för smitta.**

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt tillbehörslista.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-034621	ANVMAN AUTOKLAV	M7830-276010
2	M7786-452121	ANVMAN AUTOKLAV	M7830-276010

Daglig tillsyn

Före användning

- Vid upprättande Se avsnitt "Särskild tillsyn"
- Autoklav Om autoklaven har varit avstängd mer än en dag, kör ett snabbprogram eller motsvarande med tom kammare.
- Hela enheten Okulärbesiktning
- Vattenförrådstank Kontroll nivå. Se Ref 1 avsnitt "Kylvatten/aqua dest/aqua dem".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Hela enheten Okulärbesiktning
- Hela enheten Rengöring. Se Ref 1 avsnitt "Rengöring".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Körning Kör ett snabbprogram eller motsvarande med tom kammare regelbundet, dock minst två gånger per månad.
- Förvaring Materielen ska förvaras i utrymme utan frysrisk.
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än 1 månad ska materielen förvaras i avfuktat utrymme.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Vid upprättande

1. Hela enheten Installation. Se Ref 1 avsnitt "Installation".
2. Hela enheten Igångsättning. Se Ref 1 avsnitt "Igångsättning".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid transport

3. Vattenförrådstank Tömning. Se Ref 1 avsnitt "Tömning av vattenförrådstanken".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid frysrisk

4. Vattenpump Tömning. Se Ref 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Var 3:e månad

5. Vattenförrådstank Tömning, kontroll, rengöring vid behov. Se Ref 1 avsnitt "Rengöring".
6. Gångjärn, låsmekanism Smörjning. Se Ref 1 avsnitt "Rengöring".
7. Hela enheten Vakuumtest. Se Ref 1 avsnitt "Vakuumtest".
8. Hela enheten Provkörning. Se Ref 1 avsnitt "Provkörning".
9. Hela enheten Bakteriologisk kontroll. Se Ref 1 avsnitt "Periodisk (kvartals) bakteriologisk".

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER