

DIGITALKAMERA

MATERIELVÅRDSSHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M3835-312010	DIGKAMERA P1000
M8284-102010	KAMERA DENTAL /S
M8284-103010	KAMERA DENTAL /S

Allmänt

Tillsynen i detta schema gäller även i enheten ingående tillbehör enligt sats-/tillbehörslista.

Instruktionerna i detta schema kan skilja sig mot tillverkares/leverantörs instruktioner. Om så är fallet har det skett i samråd med tillverkare/leverantör.

Sidhänvisning inom parentes hänvisar till sida/sidor i den digitala utgåvan av publikationen.

Referenser

Ref	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Gäller för
1	M7786-033551	ANVMAN KAMERA DENT	M8284-102010
2	M7786-033581	ANVMAN KAMERA DENT	M8284-102010, M8284-103010
3	M7777-715010	SL F M8284-102010-4	M8284-102010
4	M7786-265481	ANVMAN DIG KAMERA	M8284-103010
5	M7777-715450	SL F M8284-103010-3	M8284-103010
6	M7786-097121	SNABBGUIDE P1000	M3835-312010
7	M7777-158950	TL F M3835-312011	M3835-312010
8	M7786-033591	ANVMAN KAMERA DENT	Alla
9	M7782-112007	NORM KORTTIDS FÖRV	Alla

Drift- och förvaringsmiljö

Miljö	Värde	Gäller för
Omgivningstemperatur vid drift	0 °C till 40 °C Vid batteriladdning: 5 °C till 35 °C	Alla
Transport- och förvaringstemperatur	-10 °C till 50 °C Förvaring av litiumjonbatteri: 15 °C till 25 °C	Alla
Övrig information	<ul style="list-style-type: none"> • Se Ref 1 avsnitt "Driftmiljö" sid 228 (sid 228). • Se Ref 4 avsnitt "Driftmiljö" sid 235 (sid 235). • Se Ref 6 avsnitt "Ta hand om produkten" sid 23-26 (sid 33-36). 	-

Vårdmateriel

Nr	Beteckning	Benämning	Gäller för
1	-	Luddfri trasa	Alla
2	M6454-204010	RENGÖRINGSSTS OPTIK	Alla

Anm

I tabellen ovan redovisas vårdmateriel som inte ingår i satsen.

För övrig vårdmateriel och förbrukningsmateriel som åtgår vid genomförande av vård enligt detta schema, se aktuell sats-/tillbehörslista.

Daglig tillsyn

Före användning

- Hela enheten
 - Kamera, litiumjonbatteri
- Kontroll skador, fastsättning
- Laddning.
- Se Ref 1 avsnitt "Ladda batteriet" sid 16 (sid 16).
 - Se Ref 4 avsnitt "2 Ladda batteriet." sid 14 (sid 31).
 - Se Ref 6 avsnitt "Ladda batteriet" sid 4-5 (sid 14-15) och avsnitt "Ladda batteriet" sid 24 (sid 34).

- Blixtaggregat, batterier
Statuskontroll.
Se Ref 8 avsnitt "ABOUT THE BATTERY" sid 4 (sid 4) och avsnitt "BATTERY LOADING" sid 5 (sid 5).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Under användning

- Kamera, litiumjonbatteri
Statuskontroll.
 - Se Ref 1 avsnitt "2 Kontrollera batterinivån." sid 28 (sid 28).
 - Se Ref 4 avsnitt "2 Kontrollera batterinivån." sid 20 (sid 37).
 - Se Ref 6 avsnitt "Ta bilder" sid 8 (sid 18).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Efter användning

- Kamera
Rengöring.
 - Se Ref 1 avsnitt "Rengöring" sid 205 (sid 205) (och avsnitt "Lågpassfiltret" sid 206-207 (sid 206-207)).
 - Se Ref 4 avsnitt "Rengöring" sid 213 (sid 230) (och avsnitt "Lågpassfiltret" sid 214-215 (sid 231-232)).
 - Se Ref 6 avsnitt "Rengöring" sid 27 (sid 37).Använd Vårdmateriel nr 1 och 2.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.
- M8284-102010, M8284-103010: Objektiv
Rengöring.
Se Ref 2 avsnitt "Vård av objektivet" sid 6 (sid 7).
Använd Vårdmateriel nr 2.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.
- Blixtaggregat
Rengöring med fuktad trasa.
Använd Vårdmateriel nr 1.
Se detta schema avsnitt Vårdmateriel, sidan 2.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Förvaring

- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 2.
- Kamera, litiumjonbatteri Demontering.
 - Se Ref 1 avsnitt "Sätt i batteriet" sid 17 (sid 17).
 - Se Ref 4 avsnitt "Ta ur batteriet" sid 18 (sid 35).
 - Se Ref 6 avsnitt "Ta bort batteriet eller minneskortet" sid 3 (sid 13).
- Blixtaggregat, batterier Demontering.
Se Ref 8 avsnitt "BATTERY LOADING" sid 5 (sid 5).
- M8284-102010, M8284-103010: Förvaring.
Objektiv Se Ref 2 avsnitt "Vård av objektivet" sid 6 (sid 7).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Korttidsförvaring

- Korttidsförvaring Genomför åtgärder enligt Ref 9 samt nedanstående punkter.
- Förvaringstemperatur Se detta schema avsnitt Drift- och förvaringsmiljö, sidan 2.
- Kamera, litiumjonbatteri Demontering.
 - Se Ref 1 avsnitt "Sätt i batteriet" sid 17 (sid 17) och avsnitt "Förvaring" sid 205 (sid 205).
 - Se Ref 4 avsnitt "Ta ur batteriet" sid 18 (sid 35) och avsnitt "Förvaring" sid 213 (sid 230).
 - Se Ref 6 avsnitt "Ta bort batteriet eller minneskortet" sid 3 (sid 13) och avsnitt "Förvara batteriet" sid 25 (sid 35).
- Kamera, litiumjonbatteri Ladda upp batteriet helt och ladda ur det helt var sjätte månad.
 - Se Ref 1 avsnitt "Ladda batteriet" sid 16 (sid 16).
 - Se Ref 4 avsnitt "2 Ladda batteriet." sid 14 (sid 31) och avsnitt "Vårda batteriet" sid 219 (sid 236).
 - Se Ref 6 avsnitt "Ladda batteriet" sid 4-5 (sid 14-15), avsnitt "Ladda batteriet" sid 24 (sid 34) och avsnitt "Förvara batteriet" sid 25 (sid 35).

- Blixtaggregat, batterier Demontering.
Se Ref 8 avsnitt "BATTERY LOADING"
sid 5 (sid 5).
- M8284-102010, M8284-103010: Förvaring.
Objektiv Se Ref 2 avsnitt "Vård av objektivet" sid 6
(sid 7).
- Avfuktning Vid förvaring längre tid än en månad,
förvara materielen i avfuktat förråd.

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Särskild tillsyn

Kalenderstyrda tillsyner - Långa intervall

B1 - Var sjätte månad eller vid behov

1. Kamera, litiumjonbatteri Statuskontroll.
 - Se Ref 1 avsnitt "2 Kontrollera batterinivån" sid 28 (sid 28).
 - Se Ref 4 avsnitt "2 Kontrollera batterinivån." sid 20 (sid 37).
 - Se Ref 6 avsnitt "Ta bilder" sid 8 (sid 18).
2. Kamera, litiumjonbatteri Byte vid behov.
 - Se Ref 1 avsnitt "Sätt i batteriet" sid 17 (sid 17).
 - Se Ref 4 avsnitt "Ta ur batteriet" sid 18 (sid 35) och avsnitt "3 Sätt i batteriet." sid 14 (sid 31).
 - Se Ref 6 avsnitt "Ta bort batteriet eller minneskortet" sid 3 (sid 13) och avsnitt "Sätta i batteriet och minneskortet" sid 3 (sid 13).
3. Blixtaggregat, batterier Statuskontroll.
Se Ref 8 avsnitt "ABOUT THE BATTERY"
sid 4 (sid 4) och avsnitt "BATTERY
LOADING" sid 5 (sid 5).
4. Blixtaggregat, batterier Byte vid behov.
Se Ref 8 avsnitt "BATTERY LOADING"
sid 5 (sid 5).

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER